

**Fortuna Viva** Pflegebett




# **Was Embru bietet**

# Verstellungsmöglichkeiten Liegen Sie richtig!


Embru bietet Qualität, Funktionalität und Komfort. Schlicht, elegant und von höchster Embru Qualität präsentiert sich das Fortuna Viva. Mit der innovativen, beleuchteten Handbedienung lassen sich die umfangreichen Verstellmöglichkeiten sicher, einfach und verständlich einstellen. Alle Verstellungen erfolgen sehr sanft und leise. Der Bewohner spürt die Stabilität des Bettes und fühlt sich wohl und sicher.

Die asymmetrischen Seitensicherungen werden einhändig hochgezogen und bieten dem Bewohner Schutz und Sicherheit. Durch die äusserst stabile Bauart und der asymmetrischen Konstruktion des Seitenschutzes kann dieser auch als Ein- und Ausstiegshilfe genutzt werden. Die Liegefläche mit in Gummiwippen gelagerten Doppellatten bietet höchsten Komfort und beste Prophylaxe.



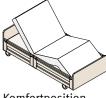

Komfortposition

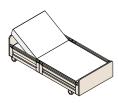


Rückenverstellung



Knieverstellung



Orthopädische Lagerung

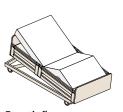

Fusstieflagerung in Komfortstellung




Fusshochlagerung


# Fortuna Viva

# Argumente die überzeugen



Die Rollenblockierung ist ohne Kraftaufwand von der Seite wie zusätzlich durch ein Langpedal von hinten jederzeit gut zugänglich und ohne Kraftaufwand einfach bedienbar.

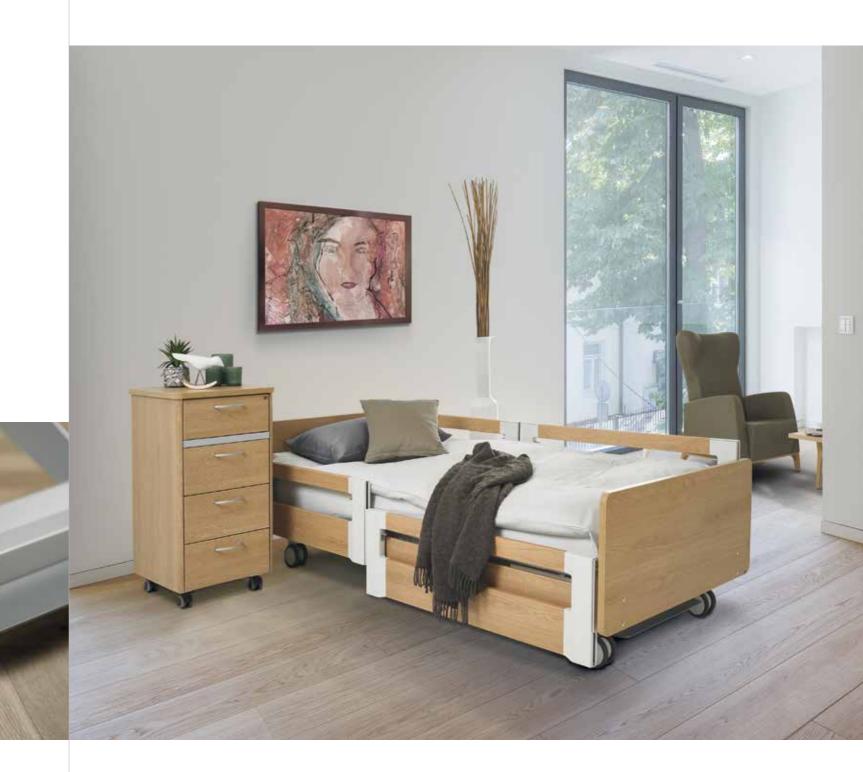

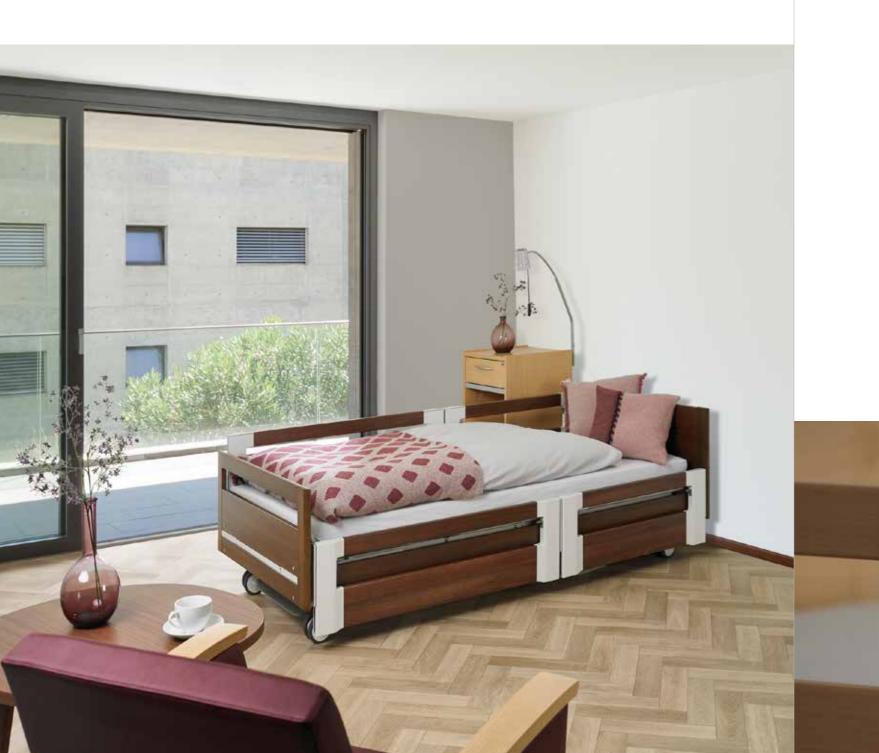



# Liegefläche 🔺

Flexible, in Gummiwippen gelagerte Doppelfederlatten bieten maximalen Komfort. Für die Reinigung lassen sie sich in Sekundenschnelle entfernen.

# **◆** Handbedienung

Die grossen und beleuchteten Symbole auf der Handbedienung sind durch die klare Farbgebung deutlich und einfach verständlich.

# Seitensicherung


Die harmonisch in den Bettrahmen integrierte Seitensicherung gibt dem Bewohner Sicherheit und bietet ihm zudem eine wertvolle Hilfe beim Ein- und Aussteigen. Die Seitensicherung funktioniert geräuscharm und durch die ausgeklügelte Technik ist ein verkanten der beiden Führungen ausgeschlossen. Die Bedienung ist äusserst einfach und das hochziehen der Sicherung sogar einhändig möglich. Das Resultat: Die Seitensicherung fühlt sich einfach gut an und Bewohner wie auch Pflegefachkräfte werden sehr schnell nicht mehr auf diese wertvolle Alltagshilfe verzichten wollen. Die Vorteile auf einen Blick:





#### **◆** Komfortable Bedienung



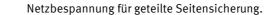



Polsterabdeckung für geteilte Seitensicherung.

# **Optionen**

# **Optionen**



## Bettdeckenhalter

Der Bettdeckenhalter ist unauffällig im Fusshaupt integriert. Durch ein leichtes Antippen fährt er aus und kann in Position gebracht werden.



#### Bettverlängerung >

Mit dieser Option kann das Pflegebett Fortuna Viva sehr einfach und ohne Werkzeug um 20 cm verlängert werden. In die entstehende Lücke lässt sich mit wenigen Handgriffen eine Liegeflächenverlängerung und das Matratzenverlängerungsstück einsetzen.



## Unterflurbeleuchtung 🔺

Die unter dem Bett angeordnete LED-Leuchte kann an der Handbedienung aktiviert werden und erleichtert die Orientierung im dunkeln Zimmer.

#### **◆** Bettleuchte

Embru hat ein Sortiment an hochwertigen LED Bettleuchten. Die abgebildete Leuchte Conalux kann sogar direkt am Bett angeschlossen werden.

# Holzumrandung

Das Pflegebett Fortuna Viva passt sich dank zwei verschiedenen Holzumrandungen und fünf verschiedenen Dekoren optimal den unterschiedlichen Wohnungsumgebungen an.

#### Modell 5940



mit Massivholzstollen, Kopf 50 cm hoch, Fuss 42 cm hoch mit Bettdeckenschlitz

#### Modell 5950



Kopf 50 cm hoch, Fuss 42 cm hoch

#### Standard Dekore



# Zubehör




#### ◆ Aufzugstange

Die Aufzugstange kann links und rechts am Bett eingesteckt und in zwei fixe Positionen gedreht werden. In den beiden Positionen kann sie sich nicht ungewollt wegdrehen und gibt dem Bewohner damit einen sicheren Halt.



#### Wandanschlagpuffer 🔺

13

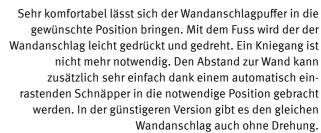



Bei ausgezogener Bettverlängerung (Option) kann die Liegefläche mit einem Verlängerungsstück und einer passenden Matratzenverlängerung auf 220 cm erweitert werden.



12

# Fortuna Viva

# Auf einen Blick

#### Technik

Ausführung	4 Motoren	
	4-teilige Liegefläche mit Doppellatten	
	mit Fussabsenkung	
Rollen	4 Doppelrollen, Ø 10 cm	
Masse		
Liegefläche	200 × 90 cm	
Länge des Bettes	213 cm	
Breite des Bettes	96 cm (ohne Seitensicherung) 103 cm (mit Seitensicherung)	
Höhe des Bettes mit Aufzugstange	208 cm (Rolle 10 cm = Standard)	
Unterfahrbarkeit	15 cm (ab Liegeflächenhöhe 34 cm)	
Gewicht		
Sichere Arbeitslast	250 kg (bei gleichmässiger Verteilung)	
Gesamtgewicht des Bettes	ca. 170 kg (ohne Zubehör)	
Verstellmöglichkeiten		
Verstellbereich Liegefläche	25 bis 80 cm vom Boden mit Zwischenposition bei 35 cm	
Verstellbereich Kopfteil	stufenlos 0° bis ca. 70°	
Verstellbereich Knieknick	stufenlos bis ca. 40°, zusätzlich Unterschenkelteil manuell	
Fusstieflage	15°	

## Optionen

Liegefläche	200 × 100 cm
Bettverlängerung	Bettverlängerung
geteilte Seitensicherung	Modell 5925
Bettdeckenhalter	Modell 5954
Verstellung	Kopftieflage
Beleuchtung	Unterflurbeleuchtung

Zubehör	
Aufzugstange	Modell 5486
Seitliche Wandanschlagpuffer	Modell 5970 schwenkbar Modell 5975 fix
Wandabweisrollen	Modell 5932
Netzbespannung	Modell 5963 (zweiteilig)
Polsterabdeckung	Modell 5964 (zweiteilig)
Seitensicherungsaufsatz	Modell 5973
Lampenhalter	Modell 5960
Liegeflächenverlängerung	Modell 5968
Matratzenverlängerungsstück	Modell 5966
Transporthilfe	Modell 5976



# Schule | Pflege | Büro | Klassiker

Klimaneutral | 150 9001 pruckprodukt | 150 14001 | 150 14001 | 150 14001 | 150 45001

**Embru-Werke AG** Rapperswilerstrasse 33 CH-8630 Rüti ZH +41 55 251 11 11 pflege@embru.ch www.embru.ch

**Embru-Werke AG** Route de Grandcour 74 CH-1530 Payerne VD +41 26 662 49 22 soins@embru.ch www.embru.ch

